



system

# AUGEN- SPRAY

HYALURON 0,3%

**Doppelherz system AUGEN-SPRAY HYALURON 0,3%** ist eine sterile, die Gleitfähigkeit erhöhende, feuchtigkeitsspendende, schützende und erfrischende, bei offenem oder geschlossenen Augen anwendbare, isotonische, biokompatible, konservierte, gepufferte Lösung zur Anwendung am Auge mit Hyaluronsäure 0,3 %. Empfohlen zur Entlastung des Auges, des Augenlids und des Bereiches um das Auge bei empfindlichen, trockenen und dehydrierten Augen. Aufgrund seiner sanften Formulierung ist es auch während des Tragens von Kontaktlinsen geeignet.

Die Sprühtechnologie, die die Lösung zu winzigen Tröpfchen reduziert, sorgt für eine bessere Verbreitung über den gesamten beteiligten Bereich und eine optimale Hydrierung.

## Anwendungsgebiete:

- Befeuchtet, hydriert, schützt und erfrischt empfindliche, trockene und dehydrierte Augen, Augenlider und den Bereich um das Auge.
- Zur Linderung bei Juckreiz, Brennen und Fremdkörpergefühl.
- Ideal bei Trockenheitsgefühl der Augen.
- Ideal bei nicht-traumatischen/nicht-pathologischen Veränderungen des Tränenfilms.
- Ideal bei umweltbedingter Belastung der Augen (übermäßige Sonneneinstrahlung, Wind, Staub, Klimaanlage, trockene und verschmutzte Luft usw.).
- Ideal bei Überanstrengung der Augen (langes Arbeiten am Bildschirm, ungünstige Lichtverhältnisse, Nachtfahrten usw.).
- Indiziert bei längerem Tragen von Kontaktlinsen.
- Auch während des Tragens von Kontaktlinsen geeignet.
- Zusammen mit homöopathischen Behandlungen anwendbar.

## Anwendungshinweise:

- Das Produkt kann bei offenem oder geschlossenem Auge angewendet werden.
- Vor der Anwendung schütteln.
- Die Flasche festhalten, den Daumen auf den Sprühkopf legen und darauf achten, dass die Düse nicht mit dem Finger abgedeckt wird.
- Die Düse etwa 10 cm vom Auge entfernt halten, seitlich positionieren.
- Bei Anwendung mit offenen Augen stets nach vorn schauen, sodass sich die Flasche am seitlichen Rand des Gesichtsfelds befindet.
- Durch Druck auf den Sprühkopf ein Wirkerosol produzieren.
- Es empfiehlt sich, bei jeder Applikation zweimal zu sprühen. Dies einmal oder mehrfach am Tag wiederholen.
- Gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgen.

## Warnhinweise:

- Bei Reizung der Augen die Anwendung des Produkts beenden und einen Augenarzt aufsuchen.
- Nicht anwenden, wenn eine Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Produkts besteht.
- Von Wärmequellen fernhalten, an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht schlucken.
- Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.
- Innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten Öffnen verbrauchen.
- Bis zur Öffnung steril.
- Das Produkt nicht anwenden, wenn die Flasche beschädigt zu sein scheint.
- Auge oder Augenlid nicht mit der Spitze der Flasche berühren.
- Flasche nach jeder Anwendung fest verschließen.
- Das Produkt mindestens 5 Minuten vor oder nach der Verabreichung anderer örtlich angewendeter Augenpräparate verwenden.

## Zusammensetzung:

Hyaluronsäure (niedermolekular) 0,3 %, Dinatriumedetat, PHMB, isotonische, auf einen pH Wert von 7,2 gepufferte Lösung.

Nicht enthalten: Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Parabene, Phenoxyethanol, Thiomersal und Bestandteile tierischen Ursprungs.

10 ml

## Hersteller:

 **Omisan farmaceutici**  
via G. Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy  
www.omisan.com

CE  
0051

 STERILE A

 5°C - 35°C



## Vertrieb und Information:



**Quaisser**  
PHARMA

Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.doppelherz.de